



GEBRUIKSAANWIJZING

ZUURSTOF FLESHOUDER

Een zuurstof fleshouder zorgt ervoor dat u thuis en/of buitenshuis over uw zuurstofapparaat kunt beschikken.

WAARVOOR DIEN HET?

Met zuurstof fleshouder is het mogelijk de zuurstoffles mee te nemen met de scootmobiel of rolstoel.

HOE WERKT HET?

De fleshouder wordt met de meegeleverde steun op de voorziening gemonteerd. De fles plaatst u hierna eenvoudig in de houder.

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Wij geven het advies de keuze en de montage van de juiste fleshouder door een erkend dealer te laten uitvoeren. De bouten, moeren en/of schroeven worden niet meegeleverd om de fleshouder te monteren.

UITVOERINGEN;

Er zijn vele verschillende zuurstofapparatuur, scootmobielen en rolstoelen. De juiste keuze voor een montage-steun voor uw zuurstofapparatuur verschilt dan ook per type. Informeer bij uw leverancier welke voor u geschikt is. Voor alle type zuurstof fleshouders verwijzen wij u naar onze website www.silema.nl

ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE

Dit product behoeft geen onderhoud. Reinigen van de fleshouder is het beste met een droge dan wel matig vochtige doek. Wij raden u wel aan om het systeem regelmatig te laten controleren op werking door vakkundig personeel dat door Silema Revalidatietechniek is geautoriseerd.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goede functioneren van de fleshouder, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

- De fleshouder mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
- De fleshouder bezit geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Veranderingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel dat daartoe door Silema is geautoriseerd.
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte assemblage, installatie, wijzigingen of herstellingen aan de fleshouder of het niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en recht op claims.

GARANTIEVERKLARING

Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn erkend

Uw leverancier van dit product voor Nederland;